

Alcoman®

Das bewährte Händedesinfektionsmittel,
RKI-gelistet im Bereich A (begrenzt viruzid, Einwirkzeit ½ Min.)

Charakteristik

Wirkt schnell und umfassend. Sehr gute Hautverträglichkeit auch bei Dauergebrauch. Dermatologisch „sehr gut“ getestet. Aldehyd- und phenolfreie Rezeptur, VAH-zertifiziert, IHO-gelistet.

Anwendung

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Geeignet für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an die Händehygiene in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie und Laborbereiche. Anwendung gemäß DGHM und EN:

Hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden / mind. 3 ml

Chirurgische Händedesinfektion: 3 Minuten / 2 x 5 ml

Hände während der Einwirkzeit feucht halten.

Alcoman® unverdünnt in die trockene Hand geben und beide Hände einreiben.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Fingerkuppen und Daumen.

Die Hände müssen während des gesamten Vorgangs mit Alcoman® feucht gehalten werden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Wirkungsspektrum

Umfassend wirksam gegen Bakterien und Hefepilze. Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid und damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV / HCV / Vaccinia inkl. HBV / HIV). Wirksam gegen Rota- und Noroviren sowie MRSA. Wirksam gegen Adeno in 2 Min.

Haltbarkeit

Alcoman® kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
01007D	150 ml	24 Flaschen	00066482
00978D	500 ml	18 Flaschen	00068742
00983D	1 l	10 Flaschen	00068759
00984D	5 l	2 Kanister	00068765

Zubehör (siehe Seite 155)

Dosierpumpe 500 ml

Dosierpumpe 1 l

Kanisterdosierpumpe

Kanisterschlüssel

Kanisterhahn



Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:
2-Propanol 63,1 g;
gereinigtes Wasser 36,9 g.

Alcoman® +

Das bewährte Händedesinfektionsmittel als Biozid

Charakteristik

Gebrauchsfertiges, hochwirksames alkoholisches Antiseptikum zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit. Besonders geeignet für häufige Anwendungen. Dermatologisch getestet. Wirkt schnell und umfassend.

Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion: Portionen von 3ml auf den Händen verreiben, um diese während 30 Sekunden feucht zu halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion: trockene Hände und Unterarme vollständig mit Alcoman® + benetzen. Im Bedarfsfall wiederholen um Hände und Unterarme mind. 5 Minuten lang feucht zu halten. Es ist zu beachten, dass immer auch alle Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig und über die gesamte Einwirkzeit benetzt werden.

Wirkungsspektrum

Umfassend wirksam gegen Bakterien und Hefepilze. Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid und damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV / HCV / Vaccinia inkl. HBV / HIV). Wirksam gegen Rota- und Noroviren sowie MRSA. Wirksam gegen Adeno in 2 Minuten.

Haltbarkeit

Alcoman® + kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

Regulatorische Anforderungen

Alcoman® + ist kein Arzneimittel und fällt unter die Biozidrichtlinie. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. VAH-gelistet. Biozid der Produktart 1 („Biozidprodukte für die menschliche Hygiene“) Biozid Reg. Nr. N-44236.

Inhaltstoffe

Zusammensetzung (in 100 g sind enthalten): 70 ml 2-Propanol

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
01007B	150 ml	24 Packungen	13814980
00978B	500 ml	18 Packungen	13814997
00983B	1 L	10 Packungen	13815040
00984B	5 L	2 Kanister	13815057

