



ERLEBEN SIE DEN OXY EFFEKT

Incidin™ OxyWipe

GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSTÜCHER

Die innovativen Produkte Incidin™ OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände.

Incidin OxyWipe bieten:

- Keine aktiven Rückstände - Wirkstoff zerfällt in Sauerstoff und Wasser
- Exzellente Materialverträglichkeit
- Wirksamkeit von Incidin™ OxyWipe für die aus dem Wischtuch freigesetzte Flüssigkeit bestätigt



*European Patent EP1987121

Incidin™ OxyWipe

GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSTÜCHER

EFFEKTIV

- Breites Wirkungsspektrum
- Kurze Einwirkzeiten

SICHER

- Keine aktiven Rückstände - Wirkstoff zerfällt in Sauerstoff und Wasser
- Exzellente Materialverträglichkeit

ANWENDUNGSFREUNDLICH

- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionstücher

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT FÜR DIE ANWENDUNG AN MEDIZINPRODUKTEN

WIRKSAMKEIT	EINWIRKZEIT
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (hohe Belastung)	
Bakterizid, levurozid	15 min
Fungizid	15 min
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie	
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 10/2022***	30 sek
Adeno	15 min
Polyoma SV40	30 sek
Rota	30 sek
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)	
EN 13727 (bakterizid)	1 min
EN 13624 (levurozid)	15 min
EN 13624 (fungizid)	15 min
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	30 min
EN 14476 (begrenzt viruzid)	30 sek
EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	60 min*
EN 14476 Adeno	1 min*
EN 14476 Noro	60 min*
EN 14476 Rota	30 sek**
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)	
EN 16615 (bakterizid)	5 min
EN 16615 (levurozid)	1 min
EN 16615 (fungizid)	5 min
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	60 min

*hohe Belastung **geringe Belastung *** DVV 2015 (Suspension Test)

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ OxyWipe	6 x 100 wipes (20 x 20 cm)	3116140 PZN 115 60 53
Incidin™ OxyWipe	6 x 50 wipes (25 x 37 cm)	3116180 PZN 138 320 09
FlowPack Wandhalter	12 x 1	100 576 86

ANWENDUNGSBEREICH



d Gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion gem. MDD 93/42/EEC: für Medizinprodukte.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen. Trocknen lassen und nicht nachwischen. Flowpack wieder verschließen. Die Benutzung der Tücher ersetzt nicht die regelmäßige Reinigung der Oberflächen. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Unkritische Medizinprodukte können mit dem Tuch gereinigt und desinfiziert werden. Für semikritische und kritische Medizinprodukte ist die Aufbereitung im Tauchbad empfohlen. Vorreinigung und -desinfektion von z. B. Sonden kann wie für unkritische Medizinprodukte durchgeführt werden. Zum Abspülen bitte Wasser in Trinkwasserqualität benutzen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Medizinprodukteherstellers. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

INHALTSSTOFFE

100g sind als Wirkstoffe enthalten: 1,0 g Wasserstoffperoxid.

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25°C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen: 3 Monate.

MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN

VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™